



טופס בדיקת נט"ן בתחילת משמרת (ראה הוראות כלליות בעמוד מס' 2) – עמ' 1/2

תאריך

קוד מבצעי

מרחב

| ערב | בוקר | לילה | תקן  | ערכות בתאים                              |
|-----|------|------|------|------------------------------------------|
|     |      |      | 1    | ערכת אינטובציה - ראה טבלת עזר            |
|     |      |      | 3    | ערכת מלט"ק (2 תיקים עם תרופות. מסומן א') |
|     |      |      | 2    | ערכת לידה                                |
|     |      |      | 1    | ערכת זונדה                               |
|     |      |      | 1    | ערכת טראומה (תיק ALS)                    |
|     |      |      | 1    | ערכת מיגון נגיפית - ראה טבלת עזר         |
|     |      |      | 1    | ערכת מעסה אוטומטי חיצוני LUCAS           |
|     |      |      | 2    | ערכה משולבת לניקוז חזה (בניידות שהוגדרו) |
|     |      |      | 1    | ציאנוקט (הידרוקסיקובלמין)                |
|     |      |      | 4    | סודיום תיאוסולפט 10gr/100ml              |
|     |      |      | 1    | ערכת פלסמה מיובשת FDP                    |
|     |      |      | תקין | ציוד רפואי בתאים - ראה טבלת עזר          |
|     |      |      | תקין | ערכת טפסים - ראה טבלת עזר                |
|     |      |      | תקין | ערכת עזרים לחירום - ראה טבלת עזר         |
|     |      |      | תקין | אמצעי תקשורת - ראה טבלת עזר              |

| ערב | בוקר | לילה | תקן | מוניטור דפיברילטור                            |
|-----|------|------|-----|-----------------------------------------------|
|     |      |      | ק   | תקינות מסך/תאריך/שעה/שידור CORPULS            |
|     |      |      | ק   | מינימום טעינה 30% / 5 סוללות (LP12)           |
|     |      |      | 1   | כבל מוניטור 4 leads                           |
|     |      |      | 1   | כבל \ מאריך קוצב (LP12)                       |
|     |      |      | 1   | כבל אק"ג                                      |
|     |      |      | 1   | כבל ETCO2                                     |
|     |      |      | 1   | חישן לסטורציה + מאריך                         |
|     |      |      | ק   | מדבקה ח"פ למוניטור (20-30 יח')                |
|     |      |      | 1   | שרוול למדידת ל"ד XL                           |
|     |      |      | 1   | שרוול למדידת ל"ד למבוגר                       |
|     |      |      | 1   | שרוול למדידת ל"ד לילד + תינוק                 |
|     |      |      | 2   | מתאם קפנוגרף לטובוס                           |
|     |      |      | 1   | מתאם קפנוגרף נזאלי                            |
|     |      |      | 1   | סרט רזרבי למוניטור                            |
|     |      |      | 1   | גל דפיברילציה (למכשירים עם כפות)              |
|     |      |      | 1   | אלקטרודות דפיברילציה מבוגר (2 סטים ב slim)    |
|     |      |      | 1   | חישן למדידת חום                               |
|     |      |      | 10  | כיסויים חד פעמיים למדחום                      |
|     |      |      | 1   | מכשיר גילוח חד פעמי                           |
|     |      |      | 1   | נגד חשמלי לבדיקת יח' דפיברילציה (מכשירי slim) |

| חוסרים / פערים / ממצאים: |
|--------------------------|
| <b>בוקר:</b>             |
| <b>ערב:</b>              |
| <b>לילה:</b>             |

| ערב | בוקר | לילה | תקן  | תיק תרופות וציוד רפואי           |
|-----|------|------|------|----------------------------------|
|     |      |      | 4    | וונפלוניס 18G, 20G, 22G (כ"א)    |
|     |      |      | 2    | וונפלוניס 14G, 24G (כ"א)         |
|     |      |      | 10   | פדי גזה                          |
|     |      |      | 2    | איספּלניני ניילון (מיקרופור)     |
|     |      |      | 10   | פד לחיטוי עור (ספוג'טה)          |
|     |      |      | 1    | ברז תלת-כיווני                   |
|     |      |      | 1    | מד-חום                           |
|     |      |      | 5    | כיסוי ח"פ למד-חום                |
|     |      |      | 2    | חסם ורידים                       |
|     |      |      | 2    | מתאם נזאלי למתן תרופות           |
|     |      |      | 3    | סט לעירוי                        |
|     |      |      | 1    | בורר זרימה                       |
|     |      |      | 2    | מזרק למתן פומי                   |
|     |      |      | 1    | מזרק 50 סמ"ק                     |
|     |      |      | 2    | מזרק 20 סמ"ק                     |
|     |      |      | 3    | מזרק 10, 5, 2.5 סמ"ק (כ"א)       |
|     |      |      | 1    | מזרק תוך גרמי למבוגר             |
|     |      |      | 5    | מדבקה לקיבוע עירוי תוך ורידי     |
|     |      |      | 3    | מחט קטומה (לשאיבת תרופות)        |
|     |      |      | 3    | מחט כחולה 23G (להזרקה)           |
|     |      |      | 5    | מדבקות לסימון תרופות             |
|     |      |      | תקין | תרופות תיק + תאים (ראה טבלת עזר) |

|                              |   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
| תיק חבישה לנט"ן ראה טבלת עזר | 1 |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|

| ערב | בוקר | לילה | תקן | ערכת סמים:                 |
|-----|------|------|-----|----------------------------|
|     |      |      |     | מספר ערכה:                 |
|     |      |      | 5   | Fentanyl Amp. + טופס מעקב  |
|     |      |      | 5   | Ketamine Vial. + טופס מעקב |
|     |      |      | 10  | Midazolam Amp.             |

| ערב | בוקר | לילה | תקן | ערכת גליל חמצן נייד              |
|-----|------|------|-----|----------------------------------|
|     |      |      | 1   | גליל חמצן 2.4 ל' (D)             |
|     |      |      | 1   | ווסת לגליל (עם יציאות לחץ) + אטם |
|     |      |      | 1   | מפתח לגליל חמצן נייד             |
|     |      |      | 1   | מסכת חמצן למבוגר                 |
|     |      |      | 1   | משקפי חמצן                       |
|     |      |      | 1   | מסכת חמצן לילד                   |
|     |      |      | 1   | מסכה לאינהלציה                   |

| ערב | בוקר | לילה | תקן  | גלילי חמצן בניידת + ציוד גליוה      |
|-----|------|------|------|-------------------------------------|
|     |      |      | 1    | מתאם יציאת DISS למנשם / CPAP        |
|     |      |      | 1    | גליל חמצן נייד 20 ל' (מיני PSI 500) |
|     |      |      | 3    | גליל חמצן 2.4 ל' (מיני PSI 1000)    |
|     |      |      | 1    | וסת למיכל חמצן נייד - רזרבי         |
|     |      |      | תקין | בדיקה הידרוסטטטית בתוקף 5 שנים      |
|     |      |      | 1    | אטם לווסת לגליל חמצן נייד           |
|     |      |      | 1    | אטם לגליל חמצן נייד                 |
|     |      |      | 1    | מפתח לגליל חמצן נייד                |

| ערב | בוקר | לילה | תקן | תיק החייאה מבוגר                            |
|-----|------|------|-----|---------------------------------------------|
|     |      |      | 1   | מפוח הנשמה למבוגר                           |
|     |      |      | 1   | מסכות הנשמה מס' 2 + מס' 5 (כ"א)             |
|     |      |      | 1   | שקית להעשרת חמצן                            |
|     |      |      | 2   | מסנן ויראלי מבוגר                           |
|     |      |      | 1   | מכשיר לשאיבת הפרשות (סקשן)                  |
|     |      |      | 1   | מנתב אוויר מס' 2-4 (כ"א)                    |
|     |      |      | 2   | קטטר שאיבה מס' 8 + מס' 18 (כ"א)             |
|     |      |      | 1   | ערכת Quicktrach מבוגר 4 מ"מ + סקלפל         |
|     |      |      | 1   | טובוסים 6-8.5 מ"מ (כ"א)                     |
|     |      |      | 1   | קטטר בוגי                                   |
|     |      |      | 1   | LMA מידות 3 + 4 + 5 (כ"א)                   |
|     |      |      | 2   | מסכת פה-אף / מגן פנים                       |
|     |      |      | 3   | מסיכה כירורגית + נשמית (N95 / FFP2 / FFP3)  |
|     |      |      | 2   | שקית הקאה                                   |
|     |      |      | 1   | מסכת CPAP (Large) + מתאם למסנן ויראלי       |
|     |      |      | 1   | שסתום PEEP                                  |
|     |      |      | 1   | ערכת אינטובציה - ראה טבלת עזר               |
|     |      |      | 1   | ערכת וידאו לרינוסקופ Mcgrath – ראה טבלת עזר |
|     |      |      | 1   | ערכת זונדה                                  |
|     |      |      | 1   | מדל"ד מבוגר + סטטוסקופ                      |
|     |      |      | 1   | מכשיר למדידת סוכר                           |
|     |      |      | 5   | סטיות לבדיקת סוכר + דוקרנים לבדיקת סוכר     |
|     |      |      | 1   | שסתום אשרמן                                 |
|     |      |      | 2   | מחט לניקור חזה                              |
|     |      |      | 2   | תחבושת אישית                                |
|     |      |      | 1   | תחבושת בינונית                              |
|     |      |      | 3   | משולש בד                                    |
|     |      |      | 1   | חסם עורקים                                  |
|     |      |      | 1   | מיכל לאיסוף חומר דוקר קטן                   |
|     |      |      | 1   | מספריים (מלע"כ)                             |
|     |      |      | 1   | שמיכת מילוט                                 |


| ערב | בוקר | לילה | תקן | תיק החייאה ילדים                           |
|-----|------|------|-----|--------------------------------------------|
|     |      |      | 1   | ערכת Quicktrach לילד 2 מ"מ                 |
|     |      |      | 1   | מפוח הנשמה לילד + צינור / שקית להעשרת חמצן |
|     |      |      | 1   | טובוסים 2.5-5.5 מ"מ                        |
|     |      |      | 1   | מכוון אנדוטרכיאלי ילד                      |
|     |      |      | 1   | מכוון אנדוטרכיאלי תינוק                    |
|     |      |      | 1   | מסכת הנשמה לייילוד                         |
|     |      |      | 1   | מסכת הנשמה מס' 0                           |
|     |      |      | 1   | מנתב אוויר מס' 00-1 (כ"א)                  |
|     |      |      | 1   | LMA מידות 2 + 2.5 + 1.5 (כ"א)              |
|     |      |      | 1   | מזרק תוך גרמי לילד                         |
|     |      |      | 1   | מזרק תוך גרמי לתינוק (NIO infant)          |
|     |      |      | 1   | מדל"ד לילד                                 |
|     |      |      | 1   | שסתום PEEP + מסנן ויראלי לילד              |
|     |      |      | 1   | סרגל ברסלאו                                |
|     |      |      | 1   | כיסוי לילוד (blizzard)                     |
|     |      |      | 2   | קטטר שאיבה מס' 6                           |
|     |      |      | 1   | מעגל חולה לילד (צנרת) למנשם מסוג sparrow   |

פראמדיק ראש הצוות: (שם מלא וחתימה) לילה

בוקר

ערב

**טופס בדיקת נט"ן בתחילת משמרת - (ראה הוראות כלליות בעמוד זה) – עמ' 2/2**

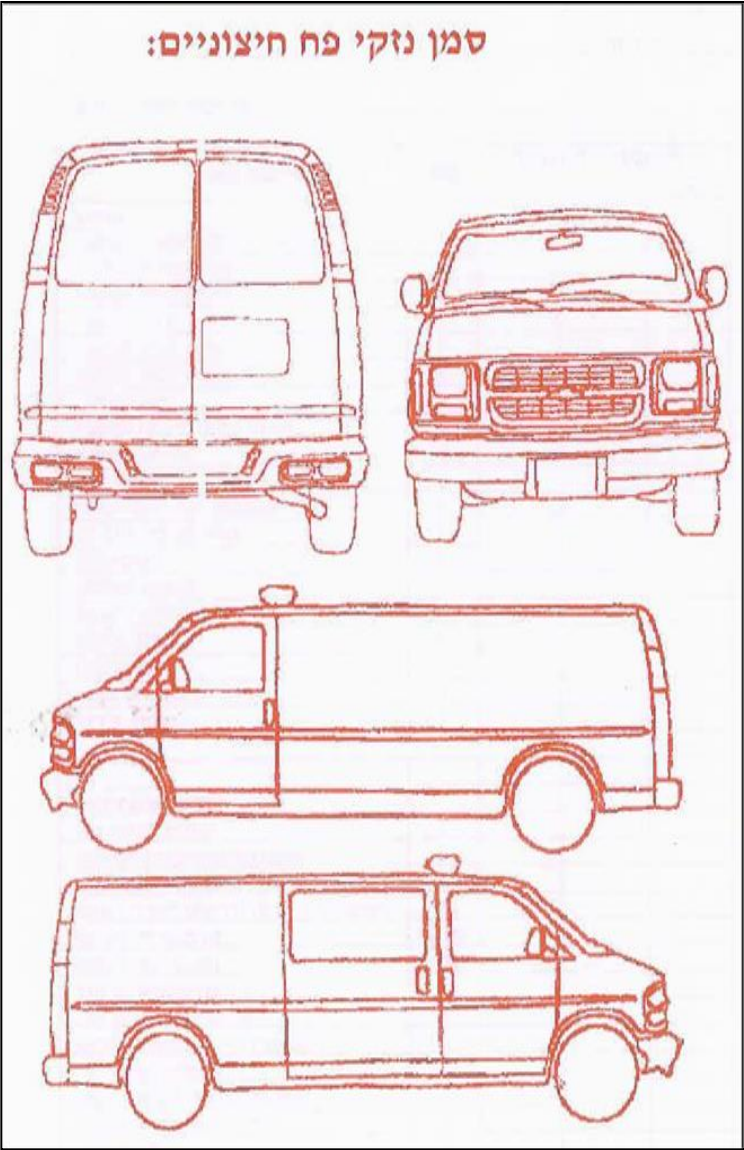

| כלי                           | תקן  |  |  |
|-------------------------------|------|--|--|
| רישיון רכב ותעודת ביטוח בתוקף | תקין |  |  |
| תקינות מערכת אורות חירום      | תקין |  |  |
| תקינות פנסים + פנסי איתות     | תקין |  |  |
| תקינות סירנה                  | תקין |  |  |
| מפלס שמן                      | תקין |  |  |
| מיכל דלק מלא                  | מלא  |  |  |
| מפלס נוזל בלמים והגה          | תקין |  |  |
| מפלס נוזל קירור               | מלא  |  |  |
| ניקיון כללי                   | נקי  |  |  |

| ציוד משקי | ראה טבלת עזר |  |  |
|-----------|--------------|--|--|
|-----------|--------------|--|--|

| כלים נלווים     | תקן |  |  |
|-----------------|-----|--|--|
| גלגל רזרבי      | 1   |  |  |
| מגבה מכני       | 1   |  |  |
| ידית למגבה      | 1   |  |  |
| כבל הנעה (זוגי) | 1   |  |  |
| מטף כיבוי       | 1   |  |  |
| מפתח גלגלים     | 1   |  |  |
| משולש אזהרה     | 1   |  |  |
| מנעול הגה       | 1   |  |  |

| אמצעי תקשורת + תיעוד              | תקן        |  |  |
|-----------------------------------|------------|--|--|
| מכשיר POC אישי + מכשיר קשר בניידת | קיים ותקין |  |  |
| מכשיר קשר                         | 1          |  |  |
| טאבלט + מדפסת                     | תקין       |  |  |
| דפים למדפסת                       | 30         |  |  |

הערות/תקלות:

**הוראות כלליות לבדיקת נט"ן**

1. בדיקת האמבולנס תיעשה לפני כל פעילות. בסיום הבדיקה ירשום ויחתום ראש הצוות את שמו במקום המיועד לכך. חתימת ראש הצוות על הטופס מאשרת כי הנט"ן נבדק כנדרש.
2. הסעיפים המודגשים מפנים לעמוד טבלאות העזר, בו נמצאים פרטי הערכות.
3. יש לסמן "✓" עבור ציוד תקין/נמצא, ו-"x" עבור ציוד שאינו תקין/לא נמצא/בחלקו. בכל מקרה של ציוד שאינו תקין, יפרט הפראמדיק בשדה ההערות.
4. **כמויות** תקן זה מהווה מלאי מינימום נדרש. יש לוודא הימצאות מלאי זה בכניסה למשמרת/פעילות, ולהשלים במידת הצורך מלאי מופחת (מלבד טבליות באריזה). בתרופות ובציוד מתכלה, כמות המקסימום לפריט לא תעלה על 10% מהרשום בתקן.
5. **ערכת טפסים** – לפחות כמות של חוברת או חוברת טפסים או פנקס או יומן – מלא/ה, בתחילת משמרת.
6. תרופות ותכשירים בהן נעשה שימוש נוסף, יש לציין ע"ג האריזה תאריך ושעת פתיחה.
7. בביצוע משמרות רצופות, או בחלקן יש לציין זאת בסעיף "הערות".
8. את הטפסים המלאים יש להעביר, בסיום היממה, לאחראי, ולהשאיר את ההעתקים בפנקס באמבולנס.

## טבלאות עזר לבדיקת נט"ן בתחילת משמרת

| ערכת עזרים לחירום |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 1                 | סד"פ למפקד מד"א באר"ן          |
| 1                 | סד"פ למפקד מד"א באט"ה          |
| 1                 | ספר חומ"ס (כתום)               |
| 15                | תג מיון ופינוי נפגעים          |
| 1                 | כיסוי לקסדה + כובע למפקד מד"א  |
| 1                 | מגפון (מצאי + תקינות) + סוללות |
| 1                 | נוהל חבירה למסוק אזרחי         |
| 3                 | אפוד מגן                       |
| 3                 | קסדת מגן                       |
| 1                 | אפוד זיהוי פראמדיק             |
| 1                 | אפוד זיהוי חובש                |
| 1                 | אפוד זיהוי מפקד כוח רפואי      |
| 1                 | אפוד זוהר לנוער                |
| 1                 | פנס וולקן (מצאי + תקינות)      |

| ציוד משקי |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 1         | לוח גב פלסטי + 3 רצועות       |
| 1         | מיטת אמבולנס + 2 רצועות       |
| 1         | אלונקה מתקפלת                 |
| 1         | כיסא מתקפל + 2 רצועות         |
| 3         | שמיכת צמר ו/או פליז ו/או פיקה |
| 2         | שק לחללים                     |
| 2         | שק לאברי גוף                  |
| 1         | סיר מיטה + בקבוק שתן          |
| 1         | מיכל לאיסוף חומר דוקר (מרובע) |
| 10        | סדינים ח"פ                    |
| 2         | בקבוק 0.5 ליטר                |
| 10        | כוסות ח"פ                     |
| 1         | זוג כפפות עבודה               |
| 1         | מרסס לכלור                    |
| 10        | טבליות כלור בקופסא            |
| 1         | בקבוק ספטול                   |
| 1         | מגבוני אלוהול לחיטוי          |

| ציוד רפואי בתאים (המשך) |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1                       | ג'ל דפיברילציה             |
| 2                       | אלקטרודות דפיברילציה מבוגר |
| 10                      | מסכות FFP3 / N95           |
| 2                       | צווארון מתכוונן למבוגר     |
| 1                       | צווארון מתכוונן לילד       |
| 1                       | מנייח ראש                  |
| 2                       | שקית קירור                 |
| 10                      | מסיכה כירורגית             |
| 2                       | סוללות חרבריות ללרינגוסקופ |
| 2                       | שמיכת מילוט                |
| 5                       | שקית איסוף כיח והקאה       |
| 1                       | מיכל לשיניים תותבות        |

| תרופות                                  | תיק  | תאים |
|-----------------------------------------|------|------|
| Adrenaline Amp.                         | 10   | 15   |
| Atropine Amp.                           | 3    | 5    |
| Amiodarone Amp.                         | 4    | 5    |
| Calcium Amp.                            | 1    | 0    |
| Dopamine Amp.                           | 2    | 4    |
| Metoprolol Vial.                        | 3    | 5    |
| Fusid Amp.                              | 10   | 10   |
| NaCl 0.9% 10ml Sol.                     | 5    | 20   |
| Ondansetron Amp.                        | 3    | 3    |
| Heparin Vial.                           | 1    | 2    |
| Droperidol Amp.                         | 2    | 2    |
| Solumedrol Vial.                        | 2    | 3    |
| Isoket Amp.                             | 1    | 2    |
| Adenosine Amp.                          | 5    | 5    |
| Naloxone Amp.                           | 5    | 5    |
| Hexakapron Amp.                         | 2    | 2    |
| Etomidate Amp.                          | 2    | 3    |
| Nitrolingual Spray / Isoket             | 1    | 1    |
| Sodium Bicarbonate 8.4%                 | 1    | 1    |
| Magnesium 50% Amp.                      | 1    | 2    |
| Labetalol Amp.                          | 1    | 1    |
| Aerovent Sol.                           | 1    | 1    |
| Ventolin Sol.                           | 1    | 1    |
| Glucogel                                | 1    | 1    |
| Glucose 50% Sol.                        | 1    | 2    |
| Aspirin Tab. – אין לגזור אריזת טבליות – | 5-10 | 5-10 |
| Paracetamol 1gr/100ml                   | 1    | 2    |
| Acamol 500mg Tab.                       | 5-10 | 0    |
| אין לגזור אריזה                         |      |      |
| Drops Optalgin                          | 1    | 0    |
| Tramadex flashtabs                      | 5    | 0    |
| אין לגזור אריזה                         |      |      |
| Nacl 0.9% 500ml                         | 1    | 8    |
| Nacl 0.9% 100ml                         | 1    | 3    |
| Lactated ringer 500ml Hartmann          | 1    | 2    |

| ציוד רפואי בתאים |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 1                | מפוח הנשמה למבוגר                        |
| 1                | מסכות הנשמה מס' 5 + 2 (כ"א)              |
| 1                | מסכת CPAP L + M מתאם למסנן ויראלי כ"א    |
| 3                | מסנן ויראלי מבוגר + ילד                  |
| 1                | מכון אנדוטיכאלי ילד + תינוק (כ"א)        |
| 2                | קטטר בוג'                                |
| 3                | קטטר לשאיבת הפרשות 6 + 8 + 18            |
| 1                | טובוס 2.5-7.0 (כ"א)                      |
| 2                | טובוס 7.5-8.0 (כ"א)                      |
| 5                | שרוך לקיבוע טובוס (יחידות)               |
| 1                | להב חד"פ מעוקל ללרינגוסקופ מס' 1-4 (כ"א) |
| 1                | להב חד"פ ישר ללרינגוסקופ מס' 0-3 (כ"א)   |
| 1                | LMA מידות 1+1.5+2+2.5+3+4+5 (כ"א)        |
| 2                | מנתב אוויר מס' 00-4 (כ"א)                |
| 10               | מסכות חמצן למבוגר                        |
| 4                | מסכות חמצן לילד                          |
| 5                | משקפי חמצן                               |
| 4                | מסכות אינהלציה                           |
| 2                | שסתום אשרמן                              |
| 2                | מחס לניקור חזה                           |
| 10               | מחס קטומה (לשאיבת תרופות)                |
| 5                | מחס כחולה G 23 (להזרקה)                  |
| 10               | וונפולן 18G, 20G, 22G (כ"א)              |
| 5                | וונפולן 14G, 24G (כ"א)                   |
| 10               | מדבקות לסימון תרופות                     |
| 4                | מתאם חאלי למתן תרופות                    |
| 4                | חסם ורידים                               |
| 50               | פד לחיטוי עור (ספונג'טה)                 |
| 1                | מספרים (מלע"כ)                           |
| 15               | מזרקים 5, 2.5, 10, סמ"ק (כ"א)            |
| 2                | מזרק 20 סמ"ק                             |
| 2                | מזרק 50 סמ"ק                             |
| 5                | מזרק למתן פומי                           |
| 2                | מזרק תוך גרמי מבוגר + ילד + מדבקות קיבוע |
| 1                | מזרק תוך גרמי לתינוק NIO Infant          |
| 3                | ברז תלת-כיווני                           |
| 10               | סטים לעירוי                              |
| 2                | בורר זרימה                               |
| 20               | מדבקה לקיבוע עירוי                       |
| 10               | דוקרנים לבדיקת סוכר                      |
| 10               | סטיקים לבדיקת סוכר                       |
| 2                | איספלטית ניילון (מיקרופור)               |
| 100              | פד גזה לא סטרילי                         |
| 1                | סטטוסקופ+ מדל"ד מבוגר                    |
| 1                | כפפות M, L, XL, S חב'                    |
| 120              | מדבקה ח"פ למוניטור                       |
| 5                | מתאם קפנוגרף לטובוס                      |
| 2                | מתאם קפנוגרף נזאלי                       |
| 2                | סרט למוניטור                             |
| 1                | מנשם                                     |
| 3                | מעגל חולה חד"פ מבוגר (למנשם Sparrow)     |
| 1                | מעגל חולה חד"פ ילד (למנשם Sparrow)       |

| ערכת אינטובציה |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 1              | ידית ללרינגוסקופ + סוללות           |
| 1              | להב חד"פ מעוקל (mac) מס' 1-4 (כ"א)  |
| 1              | להב חד"פ ישר (miller) מס' 0-3 (כ"א) |
| 1              | להב לבדיקת תקינות סוללות            |
| 1              | מלקחי מג'ל למבוגר                   |
| 1              | מלקחי מג'ל לילד                     |
| 1              | טובוס 7.5 + 8.0 מ"מ (כ"א)           |
| 2              | שרוך לקיבוע טובוס (ביחידות)         |
| 1              | מזרק 20 סמ"ק                        |
| 1              | מסכת פה-עיניים                      |
| 1              | מיכל לשיניים תותבות                 |

| ערכת אינטובציה- Mcgrath |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1                       | וידאו לרינגוסקופ Mcgrath     |
| 1                       | להב מעוקל חד"פ מס' 1,2 (כ"א) |
| 2                       | להב מעוקל חד"פ מס' 3,4 (כ"א) |

| ערכת פלסמה מיובשת FDP |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1                     | פלקון פלסמה מיובשת         |
| 1                     | נוזל ייעודי למהילה cc200   |
| 1                     | סט מחבר למהילה פלסמה בנוזל |
| 1                     | סט לעירוי 170-230 מיקרון   |

| תיק חבישה לנט"ן |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 5               | תחבושת אישית                             |
| 2               | תחבושת בינונית                           |
| 10              | משולש בד                                 |
| 1               | פולידין נוזלי + סביעור (בקבוק / 5 שקיות) |
| 1               | איספלטית ניילון (מיקרופור)               |
| 20              | פד גזה סטירילי                           |
| 10              | פלסטר (אגד מדבק)                         |
| 1               | מספרים (מלע"כ)                           |
| 2               | חוסם עורקים                              |
| 1               | סד לקיבוע                                |

| ערכת מיגון נגיפית |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 4                 | תת - ערכה למיגון אישי    |
| 1                 | פח לפסולת זיהומית דוקרת  |
| 2                 | שקית פסולת זיהומית       |
| 1                 | בקבוק ספטול              |
| 2                 | שקית לאיסוף כביסה מזוהמת |

| ערכת טפסים – ראה הוראות כלליות |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                              | חוברת דו"ח רפואי (1+2) נט"ן (רופא / פראמדיק) |
| 1                              | חוברת טפסי הודעת פטירה                       |
| 1                              | חוברת טפסי הכרזת מוות ע"י פראמדיק            |
| 10                             | מעטפות לוגו מד"א                             |

**טבלת עזר לבדיקת ערכת מוניטור דפיברילטור מדגם Corpuls 3 slim בתחילת משמרת**

| בדיקה הנחיות                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>בדיקת מוכנות מצברים וטעינה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| <b>אחוז טעינה של כל מודול גדול מ-50%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | לחץ ברציפות על לחצן המדפסת במשך 3 שניות לקבלת פלט. ודא על פי המופיע בפלט כי אחוז הטעינה בכל מודול גבוה מ-30%. במידה ואחוז הטעינה באחד המודולים נמוך מ-30% יש לחבר את המכשיר לטעינה בהקדם. |
| <b>זמן עבודה במכשיר גבוה מ-120 דקות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | חיזוי על גבי צג המכשיר כשאינו מחובר למטען. במידה וזמן העבודה נמוך מ-120 דקות יש לחבר את המכשיר לטעינה בהקדם.                                                                              |
| <b>נורית חיזוי טעינה דולקת</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | במידה והנורית אינה דולקת, יש לוודא כי המכשיר מונח היטב בתחנת הטעינה/עגינה                                                                                                                 |
| <b>בדיקת תקשורת בין המודולים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| <b>חיזוי</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | הפרד בין 3 המודולים: ודא כי החיזוי על גבי הצג השתנה לחיזוי גלי                                                                                                                            |
| חבר בין 3 המודולים: ודא כי החיזוי על גבי הצג חזר לחיזוי קווי                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| <b>בדיקת המצאות אבזרים (ע"פ תקן)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מדבקות דפיברילציה נוספות למבוגר</li> <li>2. מתאמי קפנו' נזאלי + ETCO2</li> <li>3. ג'ל דפיברילציה</li> <li>4. מדבקות מוניטור ח"פ</li> <li>5. גליל נייר רישום למדפסת</li> <li>6. כיסויים חד פעמיים לחיזון טמפרטורה</li> <li>7. גגד - לבדיקת פריקת שוק (בדגם slim בלבד)</li> </ol> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>חובת דיווח לפראמדיק אחראי:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. על כל תקלה בתפעול המכשיר.</li> <li>2. כל חוסר בצידוד היקפי (ע"פ התקן)</li> <li>3. אחוז טעינה של 0 באחד המודולים.</li> <li>4. היעדר כרטיס זיכרון או קיבולת של 300 אירועים ויותר</li> <li>5. תאריך ושעה לא מכוונים</li> <li>6. מזק חיצוני כלשהו.</li> </ol>                       |                                                                                                                                                                                           |

| בדיקה הנחיות                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>בדיקות פונקציונאליות/ויזואליות (מכשיר במצב אחוד ללא תקשורת אלחוטית)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>בדיקה עצמית בהפעלה: הפעל את המכשיר</b>                                  | לחץ לחצן On/Off כשהמכשיר מחובר למטען. וודא: לחצן סיבובי מאיר לרגע, לוגו קורפולס מופיע על הצג, המסך נדלק. אזור הפרמטרים והגלים מוצגים, אחוז הטעינה מוצג, מצב חיבור בין 3 המודולים מוצג.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>בדיקת התראות</b>                                                        | לחץ על לחצן ההתראות (ALARM KEY) וודא רשימת ההתראות וטפל בהתאם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>בדיקה ויזואלית של המכשיר כולו ושל יחידת דפיברילטור ויחידת קוצב</b>      | נתק את המכשיר מהמטען. ודא כי המעטפת החיצונית של 3 המודולים אינה שבורה או סדוקה, כבל דפיברילציה/קוצב תקין ומחובר, כפות דפיברילציה יחד עם הכבל תקינים, מארז אלקטרודות דפיברילציה שלם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>בדיקה פונקציונאלית לדפיברילטור</b>                                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Corpuls Slim</th><th>Corpuls 3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>נתק את אלקטרודות הדפיברילציה משקע האלקטרודות בגב המכשיר וחבר את הנגד.</td><td>כשהכפות נעולות בבית הכפות טען ל 200J ובצע פריקה מהכפות לנגד הפנימי של המכשיר. וודא כי לא מופיעה הודעת שגיאה.</td></tr> <tr> <td><a href="#">בצע דפיברילציה ברמת אנרגיה של 50J בלבד.</a></td><td>בשימוש ללא כפות יש לחבר את כבל הדפיברילציה הראשי לשקע שבבסיס המכשיר לפני הבדיקה.</td></tr> <tr> <td colspan="2">בדוק כי הכבל שלם ומחובר</td></tr> <tr> <td colspan="2">בדוק כי הכבל שלם ומחובר</td></tr> </tbody> </table> | Corpuls Slim | Corpuls 3 | נתק את אלקטרודות הדפיברילציה משקע האלקטרודות בגב המכשיר וחבר את הנגד. | כשהכפות נעולות בבית הכפות טען ל 200J ובצע פריקה מהכפות לנגד הפנימי של המכשיר. וודא כי לא מופיעה הודעת שגיאה. | <a href="#">בצע דפיברילציה ברמת אנרגיה של 50J בלבד.</a> | בשימוש ללא כפות יש לחבר את כבל הדפיברילציה הראשי לשקע שבבסיס המכשיר לפני הבדיקה. | בדוק כי הכבל שלם ומחובר |  | בדוק כי הכבל שלם ומחובר |  |
| Corpuls Slim                                                               | Corpuls 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| נתק את אלקטרודות הדפיברילציה משקע האלקטרודות בגב המכשיר וחבר את הנגד.      | כשהכפות נעולות בבית הכפות טען ל 200J ובצע פריקה מהכפות לנגד הפנימי של המכשיר. וודא כי לא מופיעה הודעת שגיאה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <a href="#">בצע דפיברילציה ברמת אנרגיה של 50J בלבד.</a>                    | בשימוש ללא כפות יש לחבר את כבל הדפיברילציה הראשי לשקע שבבסיס המכשיר לפני הבדיקה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| בדוק כי הכבל שלם ומחובר                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| בדוק כי הכבל שלם ומחובר                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>כבל ניטור 4 LEAD</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>כבל ניטור 6 LEAD</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>כבל סטורציה וחיישן שלמים ומחוברים</b>                                   | יש לוודא כי נורת החיישן דולקת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>כבל קפנוגרפיה שלם ומחובר</b>                                            | במידה ומופיעה התראה CO2 error, ודא כי החיישנים ממוקמים זה מול זה במגרעת הייעודית בכיס ימין. לבדיקה CO2 ניתן לחבר חיישנים למתאם אנדוטרכיאלי, לנשוף דרך המתאם לבדוק תגובה במוניטור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>צנרת ושרוול לחץ דם</b>                                                  | שלמים, מחוברים, ודא כי אין קפלים בצנרת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>כבל חיישן לטמפרטורה</b>                                                 | קיום.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>בדיקת מדפסת</b>                                                         | בדוק הימצאות גליל נייר רישום במדפסת. הרץ רישום בדיקת המדפסת, ודא שהרישום תקין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>כרטיס זיכרון</b>                                                        | לחץ ברציפות על לחצן Browser במשך 2 שניות, על המסך יוצג הארכיון וכן שורת כותרת בה יצוין אחוז הזיכרון הפנוי בכרטיס ומספר האירועים שבזיכרון. יש לרוקן את כרטיס הזיכרון כשמספר האירועים שהצטברו עליו גדול מ 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>תאריך ושעה</b>                                                          | יש לוודא תאריך ושעה מכוונים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |
| <b>חיזוי תקשורת</b>                                                        | ודא חיזוי יציב של הסמן בלוח התצוגה, לקיום תקשורת סלולרית למוקד הרפואי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                         |  |                         |  |